GUIDE D'INSTALLATION

Mise à jour CareLink™ Perso

Logiciel d'aide pour le suivi de votre diabète au quotidien.

CARELINK™ PERSO POUR LE SUIVI DE VOTRE DIABÈTE



Observez vos données ou vos courbes de glycémie grâce aux différents rapports disponibles



Téléchargez régulièrement vos données, au minimum 1 fois par mois



Partagez et discutez avec votre professionnel de santé

TÉLÉCHARGEZ LA MISE À JOUR CARELINKTM PERSO (NOUVEAU FICHIER D'INSTALLATION)

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs pour télécharger vos données, vous devez faire une mise à jour par ordinateur.



ldentifiez-vous
Cliquez sur "Téléchargez"




Cliquez sur le lien à télécharger




Identifiez le fichier téléchargé sur votre ordinateur

TÉLÉCHARGEMENT RÉALISÉ: PROCÉDEZ À L'INSTALLATION DU NOUVEAU FICHIER

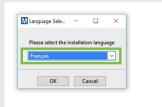

1 Choisissez votre langue

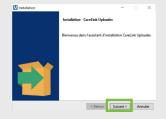


2 Cliquez sur "Suivant"



Cliquez une 2ème fois sur "Suivant"



Vérifiez que votre clé USB ou votre lecteur de glycémie ne soit pas branché et cliquez sur "OK" Cliquez sur "Fin" pour terminer l'installation

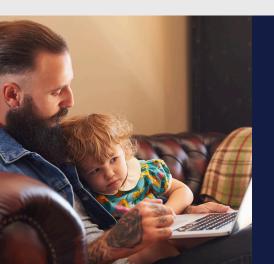

TÉLÉCHARGEMENT DE VOS DONNÉES

Connectez-vous sur la page d'accueil CareLink™ Perso et suivez les instructions au dos de cette page pour effectuer le téléchargement de vos données à partir de votre pompe ou de votre lecteur de glycémie.

Medtronic

GUIDE DE TÉLÉCHARGEMENT

CareLink[™] Perso

Ce document a pour but de vous accompagner dans le téléchargement de vos données.

LES 4 ÉTAPES

À SUIVRE POUR AJOUTER UNE POMPE OU UN LECTEUR DE GLYCÉMIE



Choisissez la pompe ou le lecteur de glycémie





Lecteur de glycémie



2 Sélectionnez votre modèle de pompe

Pompe



2 Sélectionnez votre modèle de lecteur glycémie



3 Entrez le numéro de série de la pompe



3 Sélectionnez votre lecteur de glycémie



Vérifiez que votre pompe est prête puis cliquez sur "Ajout pompe"



Vérifiez que votre lecteur de glycémie est prêt puis cliquez sur "Ajout lecteur"

LES ÉTAPES DE PRÉPARATION

Branchez votre clé USB ou votre lecteur de glycémie sur votre ordinateur:

- Une fois branché, pensez à le placer le plus près possible de la pompe
- Vérifiez que le lecteur de glycémie est bien lié à la pompe



Assurez-vous que votre pompe est prête à être téléchargée
Vérifiez que la pompe ne se trouve pas dans ce type de situation (écran de la pompe à vérifier)







- ☐ Pas de basal temporaires actifs
- ☐ Pas d'alarmes actives
- ☐ Pas de bolus en cours
- ☐ Pas de batterie faible

2 ÉTAPES

POUR
TÉLÉCHARGER
LES DONNÉES
DE LA POMPE OU
LE LECTEUR DE
GLYCÉMIE

TADE 1



Sélectionnez le dispositif concerné

ÉTADE 2



Vérifiez que le dispositif est prêt pour le téléchargement puis cliquez sur "Télécharger maintenant"

PARTAGEZ VOS DONNÉES AVEC VOTRE MÉDECIN



N'hésitez pas à discuter avec votre professionnel de santé de la synchronisation de votre compte CareLink™ Perso avec son logiciel CareLink™ Pro pour permettre l'accès à vos téléchargements. Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations. www.medtronic-diabetes be/fr/service-client/carelink/aide-sur-le-logiciel-carelink-personal-de-votre-systeme-minimed

© 2018 N.V. Medtronic Belgium S.A. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou utilisée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de N.V. Medtronic Belgium S.A. UC201901282FB